

SmartDrive MX2 + PushTracker

Guide de démarrage rapide

IMPORTANT !

LE MODE DE COMMANDE PAR DÉFAUT DU SMARTDRIVE MX2+ A CHANGÉ. SI CE MODE NE VOUS CONVIENT PAS, VOUS POUVEZ EN SÉLECTIONNER UN AUTRE.

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'UTILISATION DU SMARTDRIVE ET DU PUSHTRACKER AVANT D'UTILISER L'UN DES DEUX DISPOSITIFS.



TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.




Après avoir allumé votre SmartDrive, appuyez sur le bouton de gauche sur le PushTracker pour activer l'assistance électrique. Un voyant bleu s'allume et des vibrations sont générées.




En mode MX2+, appuyez DEUXFOIS pour DÉMARRER le moteur et le faire monter en régime. Appuyez UNE SEULE FOIS pour avancer en roue libre en maintenant la vitesse actuelle. Pousser ne permet pas d'avancer.




POUR VOUS ARRÊTER, appuyez DEUX FOIS pour désactiver le moteur, puis attrapez les deux mains courantes afin de ralentir le fauteuil roulant. Les autres modes fonctionnent différemment.

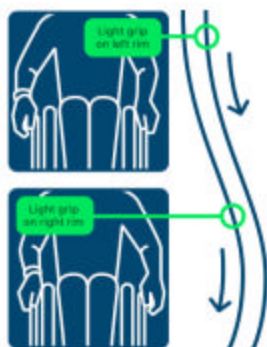

Pour diriger le fauteuil pendant que le moteur est en marche, attrapez légèrement l'une des mains courantes pour tourner dans la direction où vous souhaitez aller. Procédez comme vous avez l'habitude de faire sans le SmartDrive.

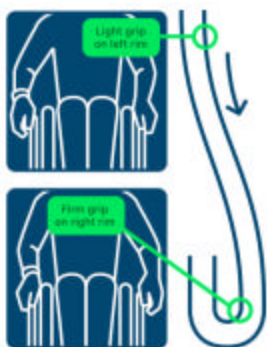

Pour tourner pendant que le moteur est en marche, attrapez l'une des mains courantes fermement pour prendre un virage serré ou pour vous retourner complètement. Procédez comme vous avez l'habitude de faire sans le SmartDrive.

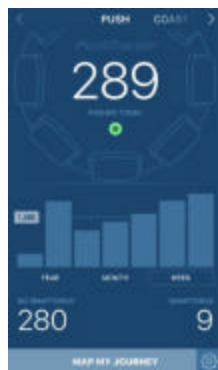

Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application PushTracker sur Apple ou Google Play Store sur votre smartphone.

www.maxmobility.fr
www.em-mob.com

