

A compléter et à renvoyer IMPERATIVEMENT...

Le non-respect de toute consigne limitera les commandes futures.



Certification de formation pour SmartDrive MX2

Il est important pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent que vous soyez formé(e) de façon appropriée à l'utilisation de l'unité de commande SmartDrive. Veuillez suivre cette formation avec rigueur et assurez-vous de compléter toutes les informations. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions.

Les unités de commande SmartDrive sont livrées en mode d'entraînement pour vous permettre de vous familiariser et de vous entraîner à désactiver le bracelet avant une utilisation intensive. Le mode d'entraînement est indiqué par un voyant DEL vert sur le bracelet.

Des vidéos éducatives sont disponibles sur www.maxmobility.fr ; elles vous seront très utiles pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur votre Smart-Drive [utilisez les sous-titres codés pour avoir des sous-titres dans une autre langue].

1) Lisez le Manuel d'utilisation SmartDrive. Veuillez tenir compte de tous les avertissements en jaune : ce sont des informations importantes pour votre sécurité. Prêtez spécialement attention aux situations dans lesquelles il est plus sécurisé d'éteindre votre SmartDrive.

2) Démontrez chacune de vos compétences à votre revendeur et pointez-les dès que vous êtes à l'aise avec chacune d'entre elles :

- Installez le bracelet sur votre poignet. **Après avoir compris et vous être assuré(e) que le bracelet doit être éteint dès que vous manipulez l'unité de commande [ou que vous vous asseyez/levez de votre fauteuil]**, allumez l'unité de commande et installez-la sur votre fauteuil roulant.
- Allumez le bracelet et laissez-le établir une connexion sans fil avec l'unité de commande.
- Avant d'appuyer dessus, exercez-vous en tapant votre main contre les cercles propulseurs avec votre poignet raide. Vous allez voir le voyant DEL du bracelet devenir rouge si vous avez bien tapé. Continuez à vous entraîner à cela jusqu'à ce que le voyant s'allume rouge à chaque fois.
- Poussez doucement pour avancer, puis appuyez sur le frein pour vous arrêter.
- Poussez doucement pour avancer lentement, puis poussez plus rapidement pour avancer plus vite et appuyez sur le frein pour vous arrêter.

Une fois que vous avez perfectionné ce geste de pression nécessaire au bracelet pour désactiver le moteur, il est temps de passer à un fonctionnement normal pour utiliser au mieux votre SmartDrive dans tous les environnements rencontrés au quotidien. Pour ce faire, il vous suffit de maintenir le bouton sur le bracelet enfoncé pendant cinq (5) secondes, après quoi vous allez sentir une vibration et voir le voyant DEL du bracelet devenir bleu ; vous pouvez alors relâcher le bouton.

- Pendant un fonctionnement normal, poussez pour avancer, faites un tour en forme de 8, puis appuyez sur le frein pour vous arrêter.

3) Signez ce formulaire ci-dessous, numérisez-le et envoyez-le par e-mail à l'adresse contact@maxmobility.fr .

Numéro de série SmartDrive _____ Date : _____

Le client

Je certifie avoir lu le Manuel d'utilisation et démontré les compétences pointées ci-dessus. J'accepte que l'unité de commande SmartDrive peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas utilisée avec précaution et je m'engage à faire des choix de conduite responsables pendant son utilisation. Je comprends qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'unité de commande SmartDrive doit être éteinte afin d'éviter qu'elle n'actionne involontairement la marche avant. Ces situations incluent notamment : circuler en pente, monter et descendre des trottoirs, franchir de grandes fissures sur des trottoirs, circuler dans des espaces confinés, avant de manipuler l'unité de commande, avant de m'asseoir et de me lever de mon fauteuil roulant.

Nom : _____ Signature : _____

Le revendeur

J'ai observé le client démontrer les compétences pointées ci-dessus.

Nom : _____ Signature : _____

